

尿中有形成分分析装置U-SCANNER®専用

機器精度管理用試薬P

■特長

- ・U-SCANNERシリーズ専用の精度管理用試薬です。
- ・スピッツの形状で提供されるので、調製不要で、そのままU-SCANNER®で測定可能です。
- ・正常域と異常域の2濃度の試薬を用意しました。
- ・合成品のため、長期間安定です。

■商品コード、包装単位


商品コード QUSC-700
包装単位 試薬N:5mL×2本(正常域)
試薬A:5mL×4本(異常域)

■貯法

冷蔵(10°C以下)で保存して下さい

■有効期間

未開封: 1年(製造後)
開封後: 1ヶ月

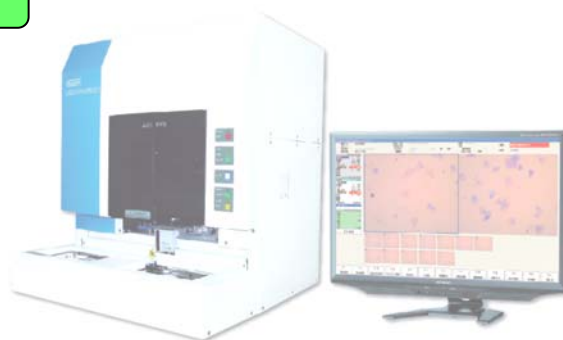

TOYOBO

東洋紡



■ 機器精度管理用試薬P測定手順

1. 自動分析装置の電源を入れ、起動します。
2. 機器精度管理用試薬の容器の蓋が完全に閉まっていることを確認した上で、20回転倒混和します。

< 転倒混和方法 >

親指で蓋、小指で容器先端を押さえ、上下が確実に逆さまになるように交互に180°回転します。回転速度は1秒につき1回180°回転する程度を目安に混合して下さい。

転倒混和後、直ちに機器精度管理用試薬Pをセットして測定を開始して下さい。

3. 試薬Nを1本、試薬Aを2本を同時測定することを推奨します。

■ 使用上または取り扱い上の注意

1. 「機器精度管理用試薬P」(本品)は、U-SCANNERシリーズ専用の消耗品を用いて使用して下さい。
2. 有効期間を過ぎた本品は使用しないでください。
3. 本品は使用前に蓋の開いていないことを確認し、測定前に充分転倒混和を行ってください。
4. 容器のキャップを取り外す際に液ダレしないようご注意ください。
5. 本品は検体スピッツと同様に正しくセットして下さい。
6. 本品内にゴミ等が混入しないようご注意ください。
7. 本品は合成品です。感染の危険性はないと考えられますが、使用時は検体と同様に取り扱い下さい。
8. 本試薬は研究用試薬です。診断などの用途には使用しないでください。



Ideas & Chemistry

東洋紡株式会社

診断システム事業部

大阪市北区堂島浜二丁目2番8号 〒530-8230

TEL: 06-6348-3335 FAX: 06-6348-3833

URL: <http://www.toyobo.co.jp/seihin/dsg/>

お取り扱い店