

## 使用方法 HOW TO USE

### 【使用目的又は効果】

本品は、上下顎骨・歯槽骨の骨欠損部または空隙部への充填による骨再生治療を目的として使用されるものであり、以下に示す骨再生治療を含む。

1. 顎裂および嚢胞腔による骨再生
2. インプラント植立を前提とした骨再生

**1** 開封 アルミ袋に破損がないか確認後、アルミ袋を開封してケースを清潔野に落とす。


**2** 浸漬 補填時の操作性を考慮して本品と患者血液又は生理食塩水を混合して使用する事ができる。

**3** 補填 各ケースに対して以下参照ください。ご使用に際しましては、製品の電子化された添付文書を必ずお読みください。


### 上顎洞底挙上術



① ウィンドウ形成+シュナイダー膜剥離

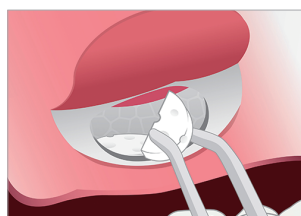

② ロッドまたはディスク埋入

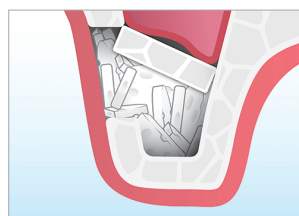

③ 創閉鎖



④ 骨再生

### 抜歯窩温存術



① 抜歯窩



② ロッドまたはディスク埋入




③ 創閉鎖




④ 骨再生

### 口唇口蓋裂

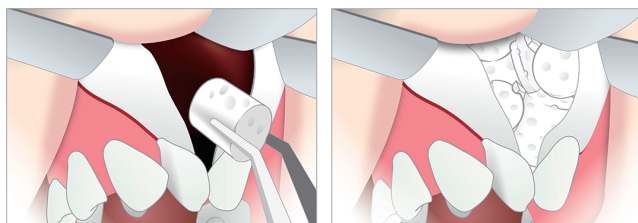

顎裂移植床へロッドまたはディスクを埋込

### 嚢胞腔

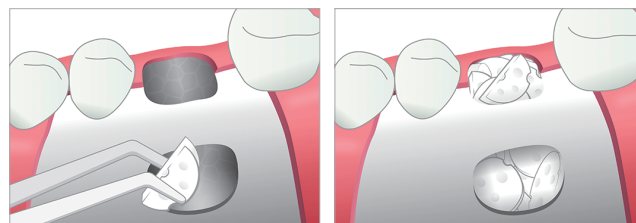

嚢胞摘出後の骨欠損部へロッドまたはディスクを埋込