

1. 開封

ナーブリッジ®を開封します。

※使用サイズの目安として、自家神経の太さより+0.5mm～+1.0mmを推奨しています。




※上記写真はサンプルです。

2. 浸漬

ナーブリッジ®を生理食塩液に浸漬します。

ナーブリッジ®を生理食塩液に3分以上浸漬して、乾燥しない間にご使用ください。


※ナーブリッジ®は生理食塩液に浮かびますが、無理に沈めようとししないでください。

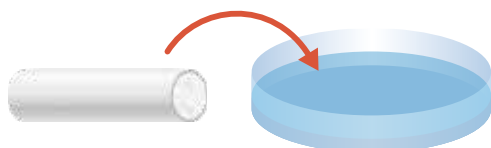


3. 縫合 (推奨)

ナーブリッジ®と自家神経を縫合糸で縫合します。

6-0～10-0の非吸収性縫合糸(ナイロン or ポリプロピレン)を使用し、中枢側から縫合します。
この際、神経軸索をできる限り傷つけないようご注意ください。

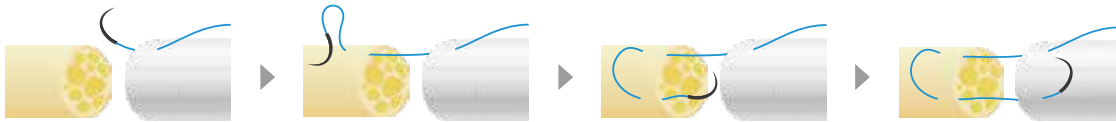


180度回転して、反対側も同様に縫合します。

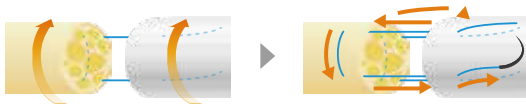

ナーブリッジ®に自家神経を引き、縫合固定します。

2本の糸を交互に引き、ナーブリッジ®内に自家神経を引き込みます。
「ナーブリッジ®の内径を目安」に引き込みが完了しましたら、縫合固定します。
この際、神経断端に過度の緊張がかからないよう、ナーブリッジ®を適切な長さに調整ください。

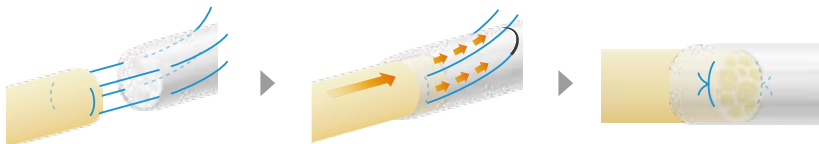

末梢側も同様に縫合します。

末梢側も同様にナーブリッジ®内に自家神経を引き込み、縫合固定します。



保管方法

保管条件:室温

有効期間

滅菌日より3年 [自己認証(自社データ)による]

- 直射日光は避けること。
- 水濡れに注意し、清潔な場所に保管すること。
- 包装に傷や破れが生じないように取扱い及び保管に注意すること。